

## Blom® 気管切開チューブシステム

気管切開患者にとっての革新的なテクノロジー

### Blom® 気管切開チューブ サクションキット サクシヨンカニューレ ニュータイプ



# Blom<sup>®</sup> Innovative Technology for Tracheostomy Patients Tracheostomy Tube System


## Blom気管切開チューブサクシオンキット(側孔付カフ付)



従来品のように数種のアウターカニューレを用意することなく、人工呼吸管理から、ウィーニングまでインナーカニューレを入替えることで対応できます。

### キット内容

側孔付カフ付気管切開チューブ  
サクシオンカニューレ / スタンダードカニューレ  
オープンチュレタ / 閉鎖キャップ  
SoftTouchチューブホルダー

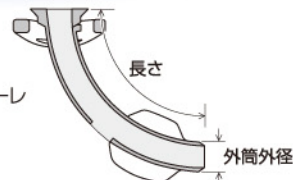

製品番号	製品名	外筒外径 (mm)	長さ (mm)	包装単位
313-13-040	Blom気管切開チューブサクシオンキット サイズ4	9.4	62	1セット/箱
313-13-060	Blom気管切開チューブサクシオンキット サイズ6	10.8	74	
313-13-080	Blom気管切開チューブサクシオンキット サイズ8	12.2	79	
313-13-100	Blom気管切開チューブサクシオンキット サイズ10	13.8	79	

医療機器承認番号22300BZX00112000

## サクシオンカニューレ ニュータイプ

側孔付カフ付チューブ対応



カフ上部に溜まった分泌物を吸引できるサクシオンカニューレはVAP対策に有効な解決策の一つです。

- インナーカニューレの外側に取り付けられたサクシオンラインはチューブの側孔レベルで終止しています。
- 20mmHgで持続的に吸引できます。
- 必要に応じてサクシオンラインのキャップを使用し、100~150mmHgで間欠的に吸引できます。
- カフの上に溜まった分泌物を排出することによって気管感染症およびVAPのリスクを低減しやすくなります。
- Blomスピーチカニューレの使用前に、8~12LPMの流量源に接続し、上気道の開通性を確認することもできます。
- サイズはカラーコードで識別できます。

製品番号	製品名	カラーコード	吸引カテーテル適合サイズ(F)	包装単位
313-50-040	サクシオンカニューレ サイズ4	グレー	6	5本/箱
313-50-060	サクシオンカニューレ サイズ6	グリーン	10	
313-50-080	サクシオンカニューレ サイズ8	ブルー	12	
313-50-100	サクシオンカニューレ サイズ10	ブラック	14	

医療機器承認番号22300BZX00112000

製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL06-6222-3751(代)・FAX06-6222-3750

販売元

**IMJ 株式会社 インターメド ジャパン**

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950