


リムホルダー乳幼児用（1090150）


CVmedica®

製品 ディスポーザブルタイプの不織布安全帯

結び方（参考例）

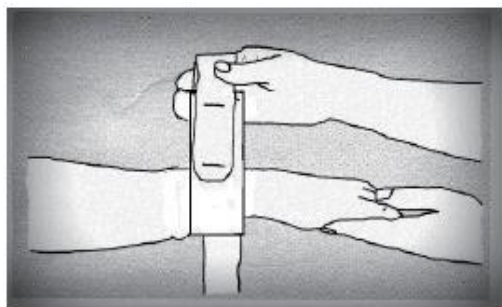

- ① リムホルダーを広げ、紐を両側に開いた状態にして患者の手首または足首にのせる。

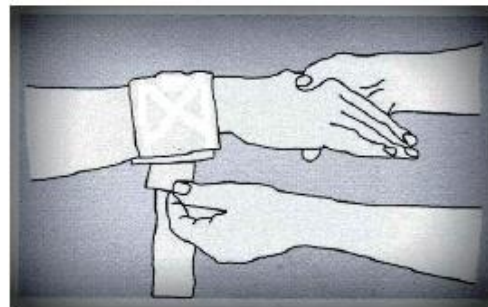

- ② きつすぎず、ゆるすぎないように調整して、面ファスナーで固定する。

材質

- 内面：綿
- 外面：ペロア
- パッド部：ポリウレタンスポンジ
- 面ファスナー部：ベルクロ
- ストラップ部：ポリエステル

使用上の注意

- 万一、製品の破損または異常が認められた場合には使用しないでください。
- 本品は、シングルペイシエントユースの製品です。

保管方法 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温で保管してください。

使用期限 製造年月より5年（箱に記載）

包装単位 12ペア/箱

外国製造業者 C.V. Medica（所在地 スペイン）

販売元 株式会社インターメドジャパン

本取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。四肢固定または抑制以外の用途によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

CVH031