

シンプルリムホルダー（1090303F）

CVmedica®

製品

ディスプレイザブルタイプの不織布安全帯

結び方（参考例）



- ① リムホルダーを広げ、通し穴が外向きになるようにして患者の手首にのせる。




- ② 反対側の紐を通し穴に入れ、手前に引く。



- ③ 手前に引いた紐をもう一度手首に巻く。



- ④ 回した紐を通し穴に入れて手前に引き、もう片方の紐を内向きに引く。

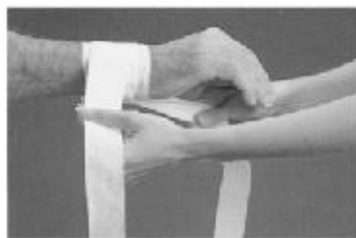

- ⑤ 内向きに引いた紐を回して手首に巻き、2本の紐が同じくらいの長さになるようにして合わせる。



- ⑥ 長さを調節し、手首の外側で二重結びにする。このとき、結び目と手首の間に2cm程の余裕を持たせる。

材質

- 不織布・ストラップ部：ポリエステル
- パッド部：ポリウレタンスポンジ

使用上の注意

- 万一、製品の破損または異常が認められた場合には使用しないでください。
- 本品は、シングルパシエントユースの製品です。

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温で保管してください。

使用期限

製造年月より5年（箱に記載）

包装単位

16本/箱、4箱/ケース

外国製造業者

C.V. Medica（所在地 スペイン）

販売元

株式会社インターメドジャパン

本取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。四肢固定または抑制以外の用途によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

CVH011